

MEDIAID

メディエイドサポーター

しっかりガード親指スタンダード

— 使用説明書 —

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
安全にご利用いただくために、必ずご使用前に本使用説明書をお読みください。
また本使用説明書はいつでもお読みになれるよう大切に保管してください。

【注意事項】

- 本製品は治療用の製品ではありません。また、使用状況によって、サポートできない場合があります。
- アレルギー体質の方や皮膚が過敏な方、装着部に骨折、傷、しびれ、腫れ、湿疹などの異常がある場合は使用しないでください。
- 血行障害や負傷事故の原因になりますので、次のことを必ず守って使用してください。
 - ・親指以外の部位に使用しないでください。
 - ・サイズの合った製品を使用してください。
 - ・就寝時は使用しないでください。
 - ・サポーター本体をぎつく締めすぎないでください。
 - ・使用中にゆるんだりずれたりした場合は、正しく装着し直してください。また、長時間使用する場合は、過度の圧迫などに注意し、適宜装着し直してください。
 - ・本製品が摩耗、損傷した場合や面ファスナーのつぎが悪くなった場合は使用しないでください。
- 本製品の使用中に、ケガ、骨折、痛み、しびれ、腫れ、湿疹などの異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると症状が悪化する原因となります。
- 面ファスナーには硬い素材を使用しています。まれに指や肌を傷つける場合がありますので注意してください。
- 本製品は、汗や摩擦などにより色落ちや他の生地の色移りする場合があります。
- 面ファスナーが衣類につかないように装着してください。ほつれや伝線の原因となります。

【お手入れ方法】

- 色の薄いものと一緒に洗濯しないでください。色落ちや他の生地の色移りする場合があります。
- 他の衣類などと一緒に洗濯する場合は、ほつれや伝線を避けるため、洗濯ネットを使用してください。
- 洗濯の際は、面ファスナーを本体にとめてください。
- タンブル乾燥は避けてください。

【洗濯表示】



※本製品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

※製品の仕様、外観などは改良のため予告なく変更することがあります。

※製品には万全を期しておりますが、万一不良なお気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。

 **SIGMAX** 日本シグマックス株式会社

<https://www.mediaid-online.jp>

お客様窓口：TEL.0800-111-3410（通話料無料）

受付時間： 10時～17時（平日） ※土日、祝日、年末年始を除く


【装着手順】

以下の装着手順は右手の場合です。左手に装着する場合も同じように装着してください。

装着手順
動画は
こちら▶





- ① サポーター本体の面ファスナーをすべて取り外し、サイズタグがある方の輪が最も大きくなるようにストラップをゆるめます。

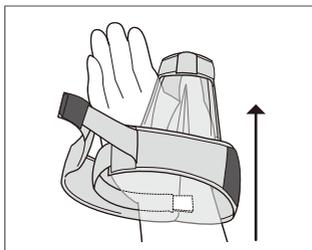


- ② 大きく広げた輪に手を通し、親指をサポーター本体に通します。

- ③ ストラップを反対側に引っ張り、手首にフィットするように面ファスナーAをとめます。このときサポーター本体の接ぎ合わせ部分を親指の中心に合わせてください。

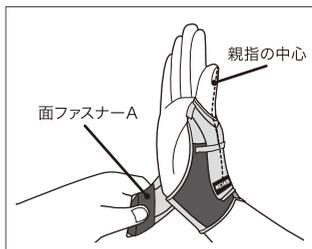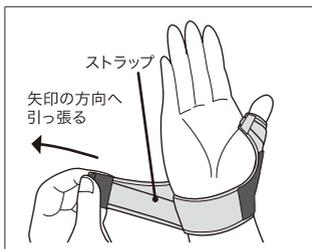

- ④ 親指ストラップを引っ張り、面ファスナーBを本体にとめます。親指ストラップを引っ張る向きと強さは好みに応じて調節してください。

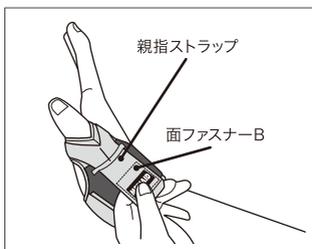

- ⑤ サポーターのゆるみやズレがないか、確かめてください。違和感がある場合は、再度、始めから装着し直してください。

【サイズ表】

製品名 メディエイドサポーター しっかりガード 親指スタンダード

サイズ	手首周囲	親指周囲	1箱入数
S	12.5cm~14.5cm	5.0cm~6.0cm	1コ
M	14.0cm~16.5cm	5.5cm~6.5cm	1コ
L	16.5cm~19.0cm	6.0cm~7.5cm	1コ

●サイズの選び方



手首と親指の太さに合わせて選んでください。
手首の太さは手首の一番細い部分、親指の太さは第一関節を計測してください。